

# CrAg<sup>®</sup> LFA



“MEJORES RESULTADOS  
en menos de la mitad de tiempo.”

Simple. Mejor.

## CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

No requiere pretratamiento de la muestra

- Sin hervir LCR
- No requiere de tratamiento con pronasa para el suero.

Resultados Cualitativos y Semicuantitativos

Vida útil de 2 años | Almacenamiento a Temperatura Ambiente


La Prueba Mas Sensible en el Mercado

10 Minutos Tiempo de Prueba,  
1 Minuto de Preparación

# CrAg<sup>®</sup> LFA

CRYPTOCOCCAL ANTIGEN  
LATERAL FLOW ASSAY

## RESULTADOS EN 10 MINUTOS 5-Simples Pasos

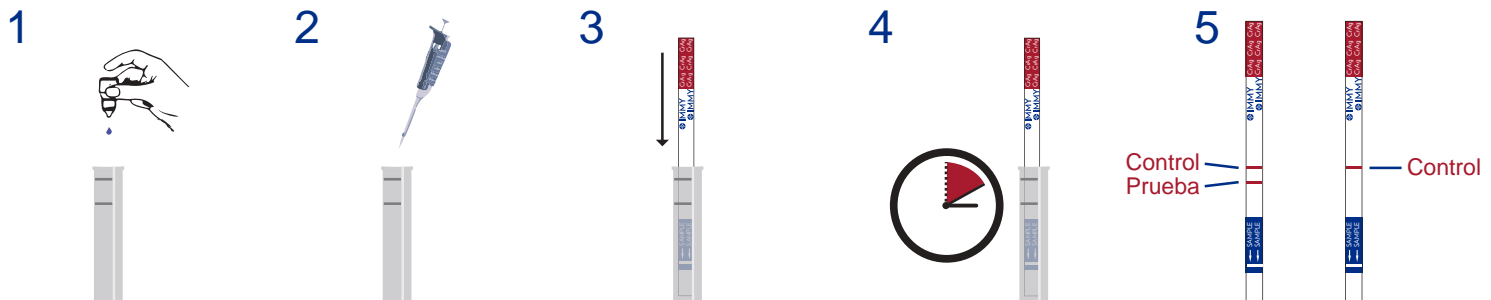

1 Añadir 1 gota del Diluyente del Espécimen

2 Añadir 40 µL del espécimen

3 Insertar la tira

4 Incubar por 10 min

5 1 línea = negativo  
2 líneas = positivo

No requiere pretratamiento de la muestra

### CrAg<sup>®</sup> LFA Límite de detección por serotipo (en ng/mL de antígeno criptocócico)

	<i>C. neoformans</i> (Serotipo A)	<i>C. gattii</i> (Serotipo B)	<i>C. gattii</i> (Serotipo C)	<i>C. neoformans</i> (Serotipo D)
<b>CrAg<sup>®</sup> LFA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
IMMY Latex Agglutination	28	48	384	62
Meridian Latex Agglutination	19	37	940	54
Meridian Premier ELISA	28	23	> 2,000	770

-TR Kozel, Clin. Vaccine Immunol. (2011) 18:1292

-TR Kozel, 8th International Conference on Cryptococcus and Cryptococcosis (2011)

Para más información o para ordenar:  
[orderproducts@immy.com](mailto:orderproducts@immy.com)  
405.360.4669  
[www.immy.com](http://www.immy.com)

Rev. 1/4/17  
 **IMMY**